

FUTURA

# Escáner intraoral Futura

---



[futorialabs.io](http://futorialabs.io)



¡Bienvenido a la Comunidad Futura!  
De hoy en adelante eres parte de la  
odontología digital.

## Contenido :

- A. 1 Escáner
- B. Dos USB: el azul es para utilizar el escaner y el negro para la instalacion del programa.
- C. 4 puntas de escaneo (3 tamaño normal y 1 de tamaño mini)
- D. 1 convertidor de corriente.
- E. 1 conector de cable USB.
- F. 1 base del escáner intraoral.
- G. 1 punta de protección para el escáner.

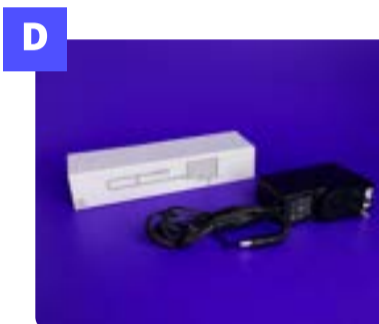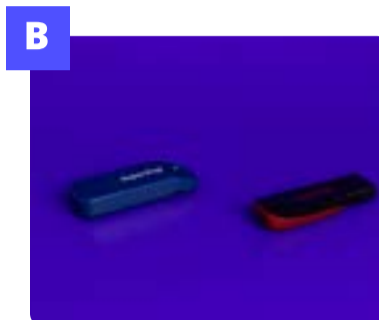

## Preparación del escáner

1. Conectar el escáner a la corriente eléctrica y al puerto USB. de alta velocidad (color azul).
2. El botón circular del escaner se encendera de color azul.
3. Entrar al programa de escáner. Crear nuevo paciente (en caso de ser necesario). Seleccionar nuevo caso para comenzar a escanear.
4. Retirar la punta de protección negra del escáner y colocar punta de escaneo intraoral.



**Nota:**  
El escáner y la computadora deben mantenerse conectados a la corriente eléctrica para realizar el escaneo.

## Escáner:

La información del archivo se compone de imágenes tomadas en 2D. El escáner está compuesto por un sistema de lentes y un sistema de registro de imágenes.

El cuerpo del escáner cuenta con un vidrio de protección en la parte de arriba.



## Punta del escáner:

La punta está hecha de un material médico libre de acero, con un prisma óptico.

Esta se conecta a la cabeza del escáner.

Esta puede ser desinfectada, con toallas húmedas para desinfección de equipo dental.



## Base:

Sostiene el escáner, mientras el escáner está en la base esta pasa a modo suspendido.



## Conector de cable USB

Este transmite la información del escáner a la computadora y a él se deben conectar escáner y convertidor.

